

K3Pro® Bohrprotokoll Implantatbohrer – chirurgischer Stahl


für Bohrgeschwindigkeiten ab 50 rpm

K3Pro® Bohrer aus chirurgischem Stahl sind bei Bohrgeschwindigkeiten über 50 rpm ausschließlich unter Kühlung zu verwenden.

Austausch nach maximal 15 Anwendungen wird empfohlen											Gewindeschneider	Senker	Implantateinbringer	Verschlusschraube
Rosenbohrer	Starterbohrer	krestaler Pilotbohrer 2,0 mm	subkrestaler Pilotbohrer 2,5 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5,0 mm	Ø 6,0 mm					
800 U/min	800 U/min	800 U/min	800 U/min	600 U/min	600 U/min	600 U/min	600 U/min	600 U/min	600 U/min		20 U/min	100 U/min	2mm 20 Ncm	5 Ncm
											45 Ncm		3mm/Short 20 - 35 Ncm	
KB1.9K	KB.STLD	KB2.0/XS * KB2.5/XS *		Sure / Short: KZB3.0/18.00S Rapid: KKB3.0/18.00S						GS_3.0	K_3.0	WSEI_1.4	VSK2K	
KB1.9K	KB.STLD	KB2.0/XS * KB2.5/XS *		Sure / Short: KZB3.0/18.00S Rapid: KKB3.0/18.00S	Sure / Short: KZB3.5/18.00S Rapid: KKB3.5/18.00S					GS_3.5	K_3.5	WSEI_1.4	VSK2K	
KB1.9K	KB.STLD	KB2.0/XS * KB2.5/XS *		Sure / Short: KZB3.0/18.00S Rapid: KKB3.0/18.00S	Sure / Short: KZB3.5/18.00S Rapid: KKB3.5/18.00S	Sure / Short: KZB4.0/18.00S Rapid: KKB4.0/18.00S				GS_4.0	K_4.0	WSEI_1.6	VSK3K VSK3K_S	
KB1.9K	KB.STLD	KB2.0/XS * KB2.5/XS *		Sure / Short: KZB3.0/18.00S Rapid: KKB3.0/18.00S	Sure / Short: KZB3.5/18.00S Rapid: KKB3.5/18.00S	Sure / Short: KZB4.0/18.00S Rapid: KKB4.0/18.00S	Sure / Short: KZB4.5/18.00S Rapid: KKB4.5/18.00S			GS_4.5	K_4.5	WSEI_1.6	VSK3K VSK3K_S	
KB1.9K	KB.STLD	KB2.0/XS * KB2.5/XS *		Sure / Short: KZB3.0/18.00S Rapid: KKB3.0/18.00S	Sure / Short: KZB3.5/18.00S Rapid: KKB3.5/18.00S	Sure / Short: KZB4.0/18.00S Rapid: KKB4.0/18.00S	Sure / Short: KZB4.5/18.00S Rapid: KKB4.5/18.00S	Sure / Short: KZB5.0/18.00S Rapid: KKB5.0/18.00S		GS_5.0	K_5.0	WSEI_1.6	VSK3K VSK3K_S	
	KB.STLD	KB2.0/XS * KB2.5/XS *			Sure / Short: KZB3.5/18.00S Rapid: KKB3.5/18.00S	Sure / Short: KZB4.0/18.00S Rapid: KKB4.0/18.00S	Sure / Short: KZB4.5/18.00S Rapid: KKB4.5/18.00S	Sure / Short: KZB5.0/18.00S Rapid: KKB5.0/18.00S	Sure / Short: KZB6.0/18.00S Rapid: KKB6.0/18.00S		GS_6.0	K_6.0	WSEI_1.6	VSK3K VSK3K_S

* Hinweis: X ist Variabel und wird durch die jeweilige Länge ersetzt |

Entnahme des Implantats aus der Verpackung

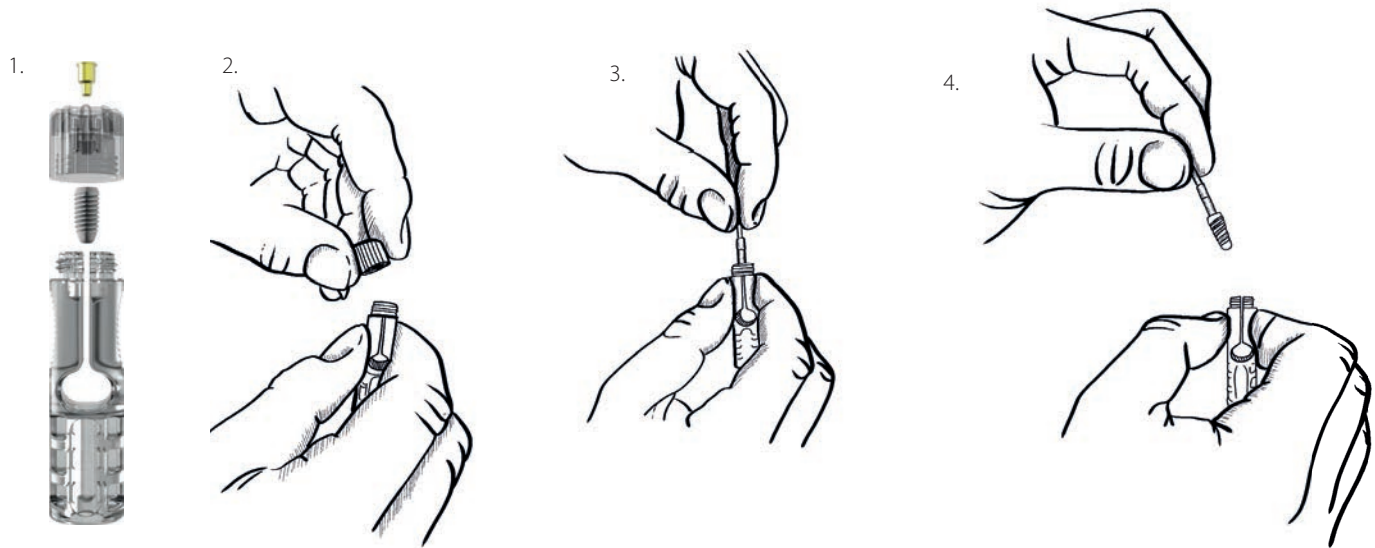

- ① Implantat, gehalten durch den Behälter. Die Verschlusschraube befindet sich im Deckel.
 - ② Freilegen des Implantatschachtes durch Abnehmen des Deckels.
 - ③ Fixieren des Implantats durch Zusammendrücken des Behälters und Einsetzen des Instruments.
 - ④ Freigabe und Entnahme des Implantats. Das Implantat wird durch eine leicht konische Klemmung gehalten.
- ↳ Achten Sie auf einen korrekten Sitz des Instruments mit Hilfe der Kontrolllinie.

Empfohlene Eindrehmomente für K3Pro® Prothetik

		2 mm	3 mm	short	
Aufbauschraube		20 Ncm	30 Ncm	20 Ncm	
Halteschraube					
OT offene Transferpfosten		5 Ncm	5 Ncm	5 Ncm	
GT geschlossene Transferpfosten					
TA Provisorische Aufbauten		5 Ncm	5 Ncm	5 Ncm	
TA Gingivaformer	Titan	5 Ncm	5 Ncm	5 Ncm	
	Peek	5 Ncm	5 Ncm	5 Ncm	
FLA Locator		20 Ncm	30 Ncm	20 Ncm	
KKA Kugelkopf Aufbauten					
MB Multibase Aufbauten		20 Ncm	30 Ncm	20 Ncm	
VBA RapidFix® Aufbauten		20 Ncm	30 Ncm	20 Ncm	
	sekundäre Halteschraube	15 Ncm	15 Ncm	15 Ncm	