


K3Pro® Bohrprotokoll Implantatbohrer – Titan für Bohrgeschwindigkeiten

	Rosenbohrer	Starterbohrer	krestaler Pilotbohrer 2,0 mm	subkrestaler Pilotbohrer 2,5 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,5 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,5 mm	Ø 5,0 mm	Ø 6,0 mm	Gewindeschneider	Senker	Implantateinbringer	Verschlusschraube
	800 U/min	800 U/min	800 U/min	800 U/min	50-100 U/min	50-100 U/min	50-100 U/min	50-100 U/min	50-100 U/min	50-100 U/min	20 U/min 45 Ncm	100 U/min	2mm 20-25 Ncm 3mm/Short 20-35 Ncm	5 Ncm
	Austausch nach maximal 15 Anwendungen wird empfohlen													
Ø 3,0 mm														
	KB1.9K	KB.STLD	KB2.0/XS	KB2.5/XS	Sure / Short: KSB3.0/18.00S Rapid: KRB3.0/18.00S						GS_3.0	K_3.0	WSEI_1.4	VSK2K
Ø 3,5 mm														
	KB1.9K	KB.STLD	KB2.0/XS	KB2.5/XS	Sure / Short: KSB3.5/18.00S Rapid: KRB3.5/18.00S	Sure / Short: KSB3.5/18.00S Rapid: KRB3.5/18.00S					GS_3.5	K_3.5	WSEI_1.4	VSK2K
Ø 4,0 mm														
	KB1.9K	KB.STLD	KB2.0/XS	KB2.5/XS	Sure / Short: KSB3.5/18.00S Rapid: KRB3.5/18.00S	Sure / Short: KSB3.5/18.00S Rapid: KRB3.5/18.00S	Sure / Short: KSB4.0/18.00S Rapid: KRB4.0/18.00S				GS_4.0	K_4.0	WSEI_1.6	VSK3K VSK3K_S
Ø 4,5 mm														
	KB1.9K	KB.STLD	KB2.0/XS	KB2.5/XS	Sure / Short: KSB3.5/18.00S Rapid: KRB3.5/18.00S	Sure / Short: KSB3.5/18.00S Rapid: KRB3.5/18.00S	Sure / Short: KSB4.0/18.00S Rapid: KRB4.0/18.00S	Sure / Short: KSB4.5/18.00S Rapid: KKB4.5/18.00S			GS_4.5	K_4.5	WSEI_1.6	VSK3K VSK3K_S
Ø 5,0 mm														
	KB1.9K	KB.STLD	KB2.0/XS	KB2.5/XS	Sure / Short: KSB3.5/18.00S Rapid: KRB3.5/18.00S	Sure / Short: KSB3.5/18.00S Rapid: KRB3.5/18.00S	Sure / Short: KSB4.0/18.00S Rapid: KRB4.0/18.00S	Sure / Short: KSB4.5/18.00S Rapid: KKB4.5/18.00S	Sure / Short: KSB5.0/18.00S Rapid: KKB5.0/18.00S		GS_5.0	K_5.0	WSEI_1.6	VSK3K VSK3K_S
Ø 6,0 mm														
	KB1.9K	KB.STLD	KB2.0/XS	KB2.5/XS	Sure / Short: KSB3.5/18.00S Rapid: KRB3.5/18.00S	Sure / Short: KSB3.5/18.00S Rapid: KRB3.5/18.00S	Sure / Short: KSB4.0/18.00S Rapid: KRB4.0/18.00S	Sure / Short: KSB4.5/18.00S Rapid: KKB4.5/18.00S	Sure / Short: KSB5.0/18.00S Rapid: KKB5.0/18.00S	Sure / Short: KSB6.0/12.00S Rapid: KRB6.0/12.00S	GS_6.0	K_6.0	WSEI_1.6	VSK3K VSK3K_S

* Hinweis: X ist Variabel und wird durch die jeweilige Länge ersetzt |

Entnahme des Implantats aus der Verpackung

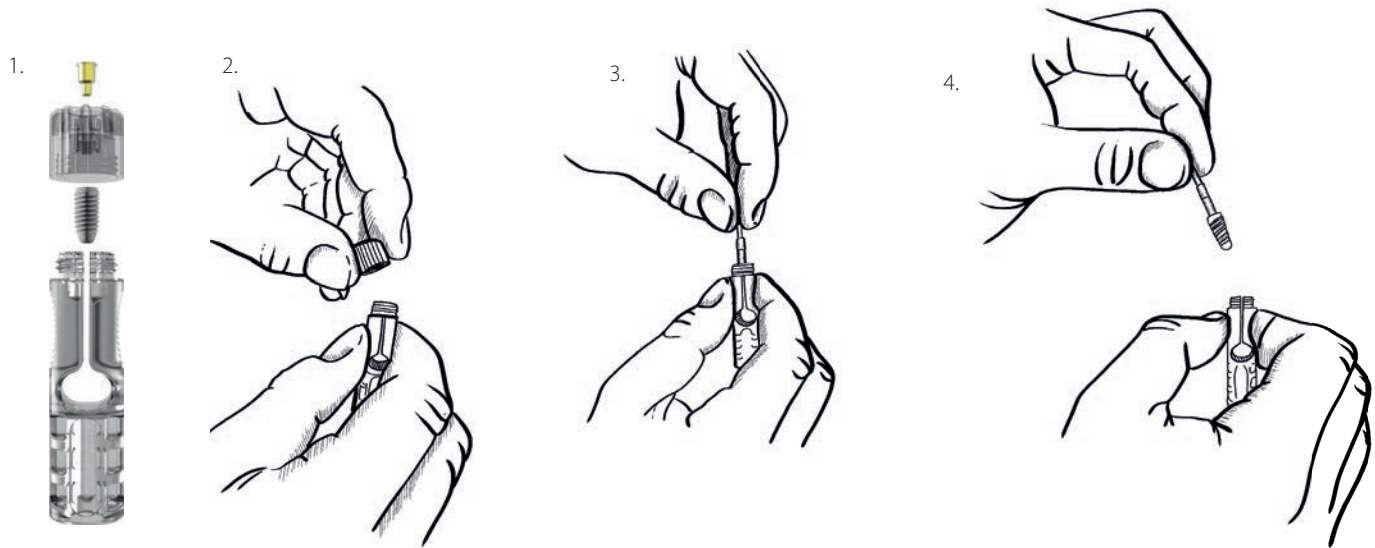

- ① Implantat, gehalten durch den Behälter. Die Verschlusschraube befindet sich im Deckel.
- ② Freilegen des Implantatschachtes durch Abnehmen des Deckels.
- ③ Fixieren des Implantats durch Zusammendrücken des Behälters und Einsetzen des Instruments.
- ④ ↳ Achten Sie auf einen korrekten Sitz des Instruments mit Hilfe der Kontrolllinie.
Freigabe und Entnahme des Implantats. Das Implantat wird durch eine leicht konische Klemmung gehalten.

Empfohlene Eindrehmomente für K3Pro® Prothetik

		2 mm	3 mm	short	
Aufbauschraube		20 Ncm	30 Ncm	20 Ncm	
Halteschraube					
OT offene Transferpfosten		5 Ncm	5 Ncm	5 Ncm	
GT geschlossene Transferpfosten					
TA Provisorische Aufbauten		5 Ncm	5 Ncm	5 Ncm	
TA Gingivaformer	Titan	5 Ncm	5 Ncm	5 Ncm	
	Peek	5 Ncm	5 Ncm	5 Ncm	
FLA Locator					
KKA Kugelkopf Aufbauten		20 Ncm	30 Ncm	20 Ncm	
MB Multibase Aufbauten		20 Ncm	30 Ncm	20 Ncm	
VBA RapidFix® Aufbauten		20 Ncm	30 Ncm	20 Ncm	
	sekundäre Halteschraube	15 Ncm	15 Ncm	15 Ncm	